



# PIERWSZA APLIKACJA OPATRUNKU Dibucell Active:




1  
Oczyszczoną mechanicznie lub enzymatycznie ranę przemyć jałowym 0,9% NaCl, a następnie środkiem antyseptycznym.

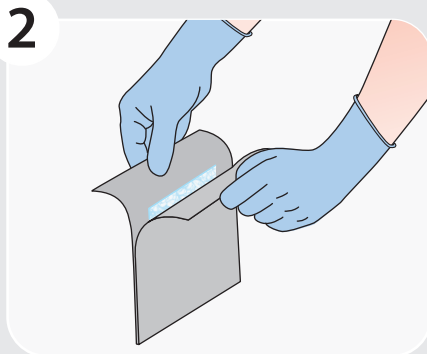

2  
Opakowanie opatrunku rozerwać oburącz w oznaczonym miejscu.

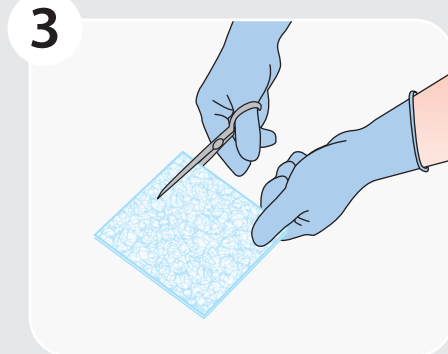

3  
Przed nałożeniem opatrunku dostosować przez docięcie go do wymiarów i kształtu rany.

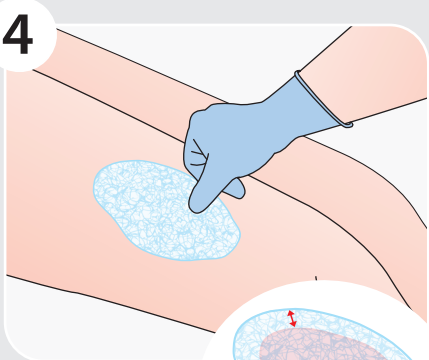


4  
Przyciąć, aby występował maksymalnie 0,5 cm po za jej obręb.

0,5 cm




5  
Położyć opatrunek i lekko go docisnąć, tak aby przylegał do rany.

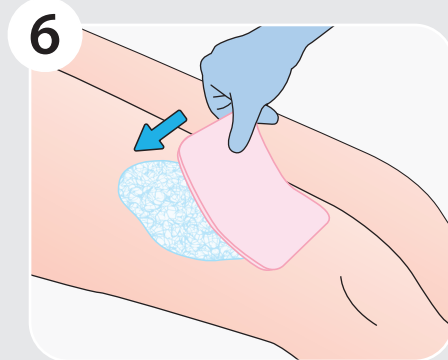

6  
Opatrunek Dibucell Active przykryć wtórnym opatrunkiem chłonnym (najlepiej piankowym).

## DALSZE LECZENIE OPATRUNKIEM DibuCell Active:

7

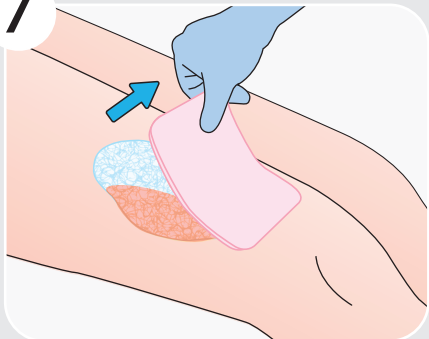

Zdjąć wierzchni opatrunek chłonny, tak aby nie naruszyć warstwy zaaplikowanego wcześniej opatrunku DibuCell Active.

8




Oceń stopień degradacji. Niezdegradowane części opatrunku pozostawić bez ingerencji. Oceń stopień nawilżenia. W razie potrzeby przepłukać ranę jałowym roztworem soli fizjologicznej 0,9% NaCl.

9



W miejsce zdegradowanego opatrunku nałożyć kolejny DibuCell Active, zachowując wytyczne dotyczące dostosowania opatrunku do kształtu i wielkości rany.

10

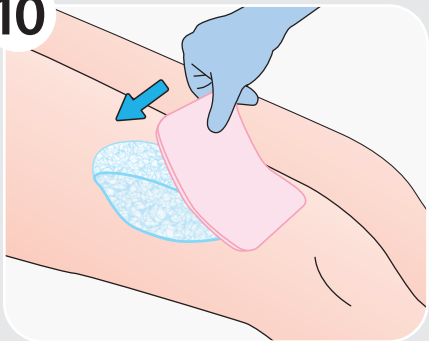

Zabezpieczyć opatrunkiem chłonny, pamiętając o marginesie ok. 0,5 cm.